

BAND

NEOFIX®

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ ЭЛАСТИЧНЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

Для фиксации перевязочных средств
и медицинских устройств

Регистрационное удостоверение № P3N 2021/13856 от 31.03.2021

Размеры: 5 см x 450 см,
10 см x 450 см,
15 см x 450 см
(длина бинта указана в растянутом состоянии)

Форма выпуска: рулон

Фасовка: 1 шт. - в индивидуальной упаковке,
12 шт. - в блоке

Показания:

- для фиксации повязок всех типов (марлевых салфеток, повязок, компрессов) в особенности на суставах, частях тела, имеющих коническую или округлую форму;
- для фиксации различных медицинских устройств (трубок, катетеров, электродов, шин, лонгет);
- при занятиях спортом в качестве спортивного биндажа, в качестве поддерживающего бинта для сухожилий и связок, при мышечной боли, при растяжениях, повреждениях опорно-двигательного аппарата, в том числе при спортивных травмах.

Преимущества использования:

- Не требует завязывания за счет когезивных свойств;
- Не нужны ножницы, поскольку бинт самоотрывной;
- Класс компрессии – I;
- Не сковывает движений;
- Экономный расход материала в результате когезивных свойств, поскольку даже несколько витков обеспечивают надежную фиксацию на длительный срок;
- Не прилипает к коже, волосам или одежде;
- Не раздражает кожу, хорошо пропускает воздух;
- Не теряет своих свойств при погружении в воду;
- Устойчив к стерилизации;
- Имеет «телесный» цвет.

Меры предосторожности:

Для одноразового применения. Повторное применение может привести к потере эффективности. Не является стерильным и не предназначен для прямого контакта с раной и поврежденной кожей.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материалов. Бинты NEOFIX BAND -N и NEOFIX BAND -T содержат натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции, включая анафилактические, у отдельных лиц. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование бинта и обратитесь за консультацией к врачу.

Инструкция по применению, техника наложения:

Возьмите бинт подходящего размера и длины.


A. Сделайте один оборот бинта вокруг нужной части тела.

B. Следующие туры делайте «внахлест», перекрывая предыдущий слой повязки хотя бы наполовину.

C. Отрежьте или оторвите оставшуюся часть бинта.

D. Заканчивая перевязку, наложите верхний слой бинта на предыдущий, полностью перекрывая его для закрепления, и слегка прижмите ладонью для хорошей фиксации.

Излишне тугое бинтование может привести к нарушению кровоснабжения.

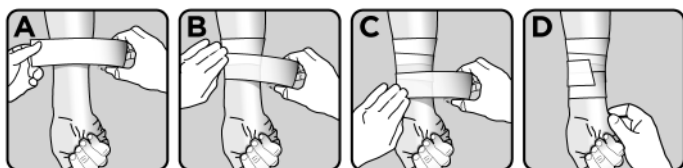

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от -5° до +40°С. Срок годности см. на упаковке.

EC REP SUNGO Europe B.V.



VAT: NL857821659B01

Address: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Contact: SUNGO Secretary Tel: +31(0)202111106

E-mail: ec.rep@sungogroup.com



ISO13485



Производитель: «Чжэцзян Кэкан Медикал Технолджи КО., ЛТД», Саут Вилладж, Хонгкиао Таун, 325608, Юэкинг Чжэцзян Китай
Импортер/ Уполномоченная организация: ООО «Атекс Групп», 140055, Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, промзона ООО «Технопром», корп. Е, офис 303.
E-mail: info@atex-gr.com.

Петензии потребителей принимаются уполномоченным представителем производителя.



BAND - LF

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
БЕЗ ЛАТЕКСА

Состав: полипропилен, полиизопрен.



BAND - N

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Состав: полипропилен, натуральный латекс.



BAND - T

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Состав: хлопковая ткань, натуральный латекс.

